

## ステップ台(EEX-RE330S-3、EEX-RE330S-3N)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

ドライバー  
レンチ(10mm)  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


### 組立て部品



ステップ台×1台

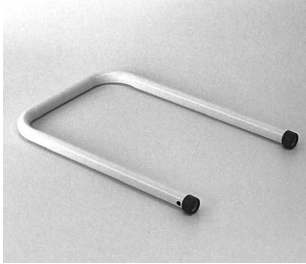


手すり×1個

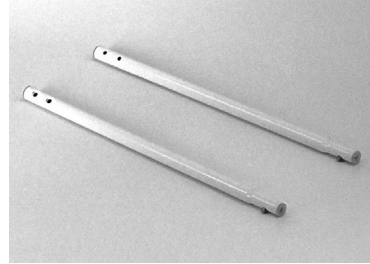


ポール×2本


### 使用ボルト

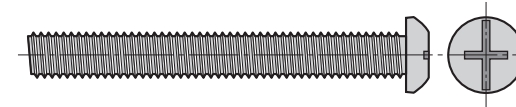

ボルト×4本 [M6×50]

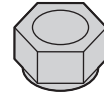

ナット×4個

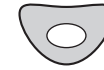


ワッシャー×4枚

### 使用上の注意

- 2ヶ月を目安に、ボルトを定期的に締め直してください。
  - ボルトがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - お子様には本製品に触れさせないでください。
  - 平坦な床面で使用してください。
  - 濡れた床面では使用しないでください。
  - 本製品に座ったり、登ったりしないでください。転倒の原因になります。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

### 1.ステップ台にポールを取付けます。


#### 使用ボルト

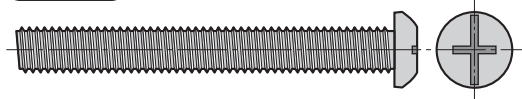

ボルト [M6×50]

ポール  
※ボタンが外側にくるよう  
ように取付けます。

ステップ台

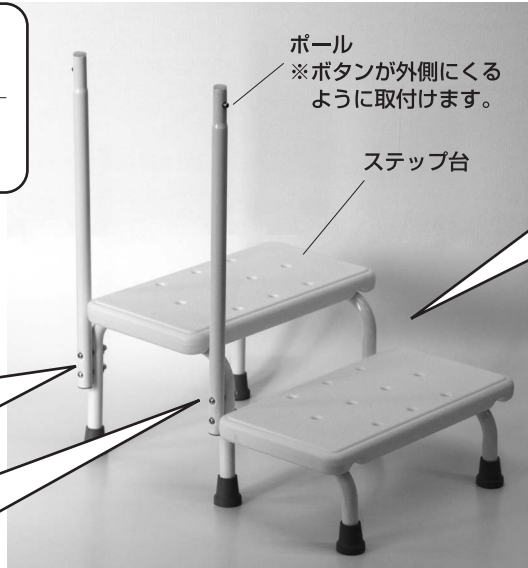

ボルト

ナット


ワッシャー

※レンチ(10mm)とドライバーでしっかり固定してください。




EEX-RE330S-3Nの場合は  
ステップ台の左右どちらにでも  
取付けることが可能です。

### 2.ポールに手すりを取付けて完成です。

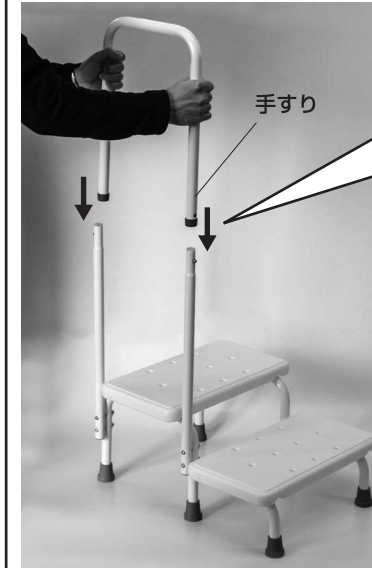

ボタンを押しながら  
差し込みます。

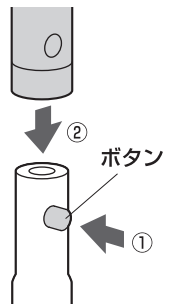

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島穂田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/AD/K(pdf)