

ステッキチェア (EEX-CHST01シリーズ) 取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


Ver.1.0

完成図

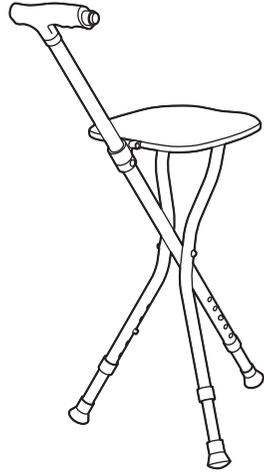

折りたたみ方


①座面の前端を持ち上げます。

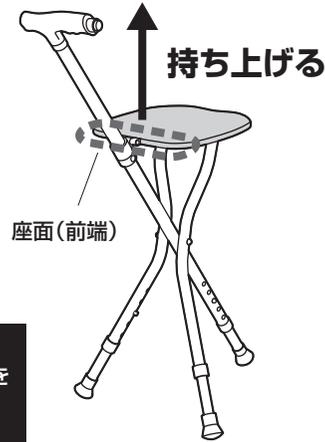

<注意>
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。

②パチンと音がするまで座面を押し込みます。

座面を押し込むと脚にツメが差し込まれます。

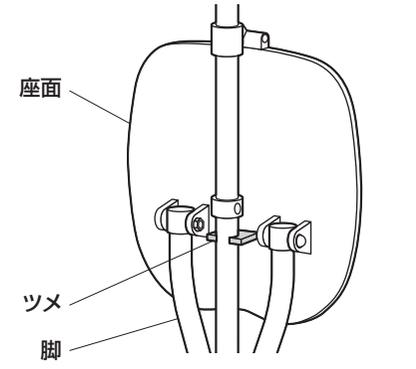


パチン!


押し込む

開き方


①脚の長さを揃えます。

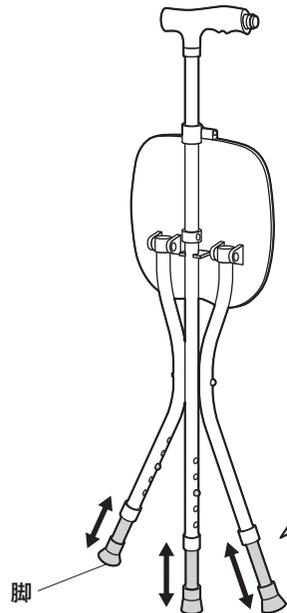

固定ボタンを押し込んで
3本とも同じ位置の穴に合わせます。

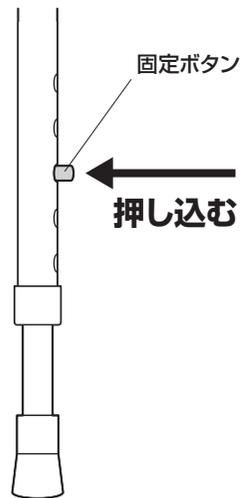


②座面と脚を開きます。

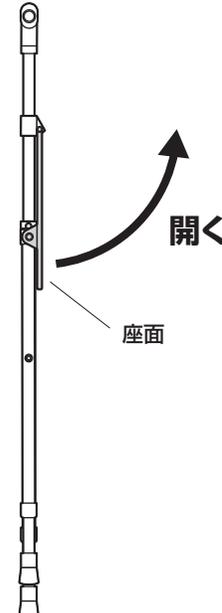

<注意>
可動部に指などを挟まないように
ご注意ください。


③座面を上から押し、脚を完全に開いて完成です。

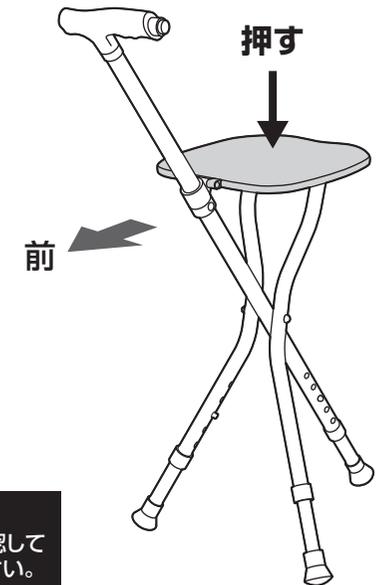


<注意>
転倒しないことを確認して
前向きで座ってください。

電池の交換方法


①キャップを外します。

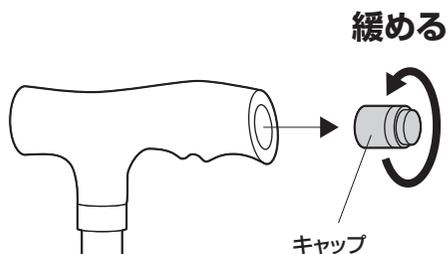

②単三乾電池を電池収納スロットに入れます。
※正しい極性で入れてください。

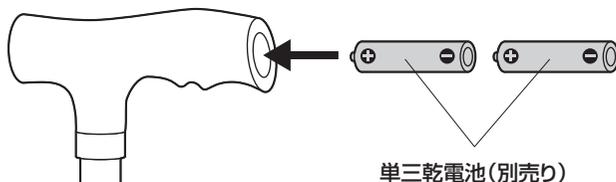


③キャップを取付けます。

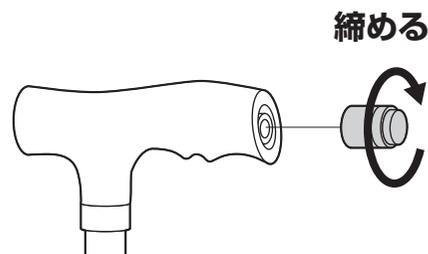

ライトの使用法

スイッチを一回押すとLEDが点灯します。
もう一度押すと消灯します。

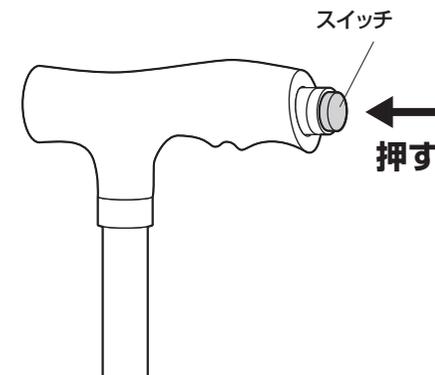


チェアの品質表示

構造部材:座部、ハンドル部/PP
フレーム部/アルミ、TPR


<ご使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - パーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

●最大耐荷重(80kg)を超える荷重は加えないでください。

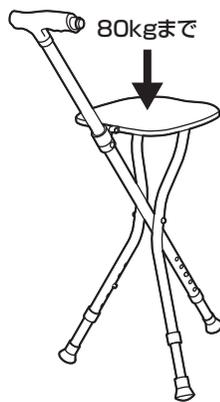

●座っている時や着座、立ち上がる時は1点に荷重をかけないでください。転倒や破損の恐れがあります。

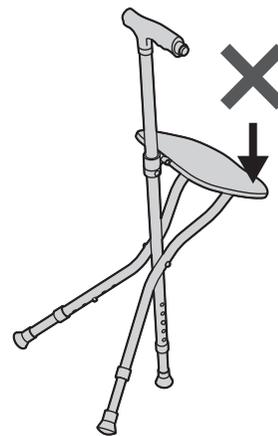

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

山陽トランスポート有限公司社

保証書	型番: EEX-CHST01シリーズ
お客様: お名前・ご住所・TEL	
購入店・担当者	
保証期間 3ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
CD/BB/RKDaC