

トイレ用アーム(EEX-RE269)組立説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

組立説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。下記の要領でご使用ください。

1.使用上の注意

- 2ヶ月毎を目安に、ボルトを定期的に締め直してください。
 - 留め具が外れた状態では使用しないでください。
 - お子様には本製品に触れさせないでください。
 - 平坦な床面で使用してください。
 - 濡れた床面では使用しないでください。
 - 本製品に座ったり、登ったりしないでください。転倒の原因になります。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

2.組立部品



フレームA×1個



フレームB×1個




バー×2本




留め具×4個

3.使用方法


1.フレームにバーを取付けます。

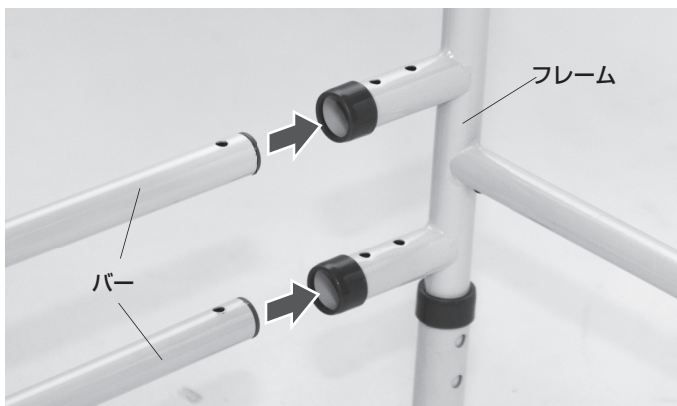

2.フレームに留め具を取付けます。

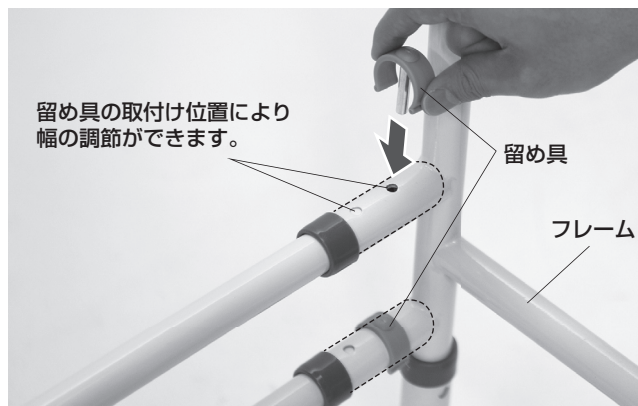

補助アームの高さの調節方法

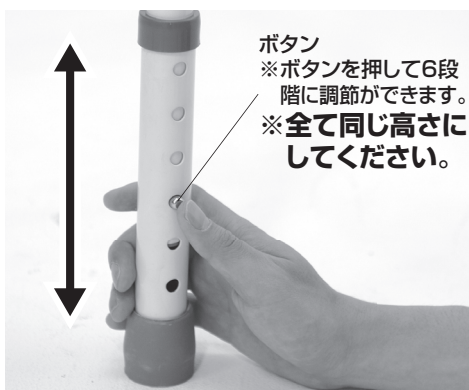

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/AD/K10df