


介護用歩行器(EEX-RE503L)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は下記の要領でお取り扱いください。

取扱説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


開き方

サイドフレームを「カチッ」と音になるまで広げます。

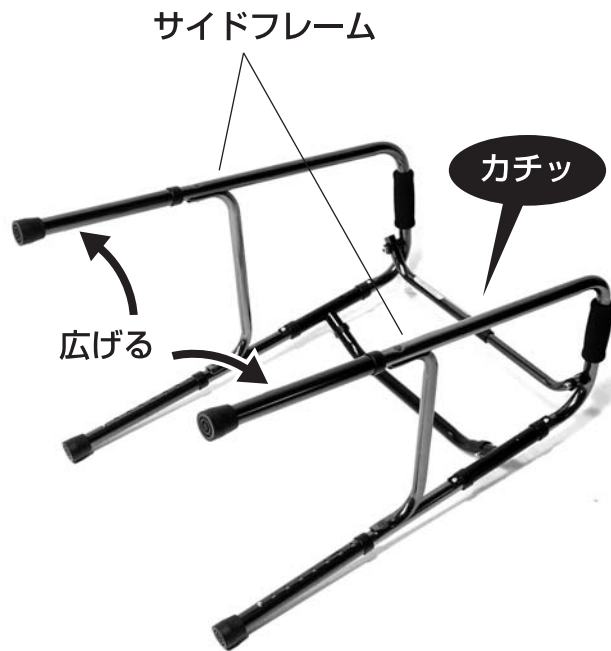


折り畳み方

①固定型歩行器として使用している場合は、角度ストッパーを取外し、バーに取付け直します。

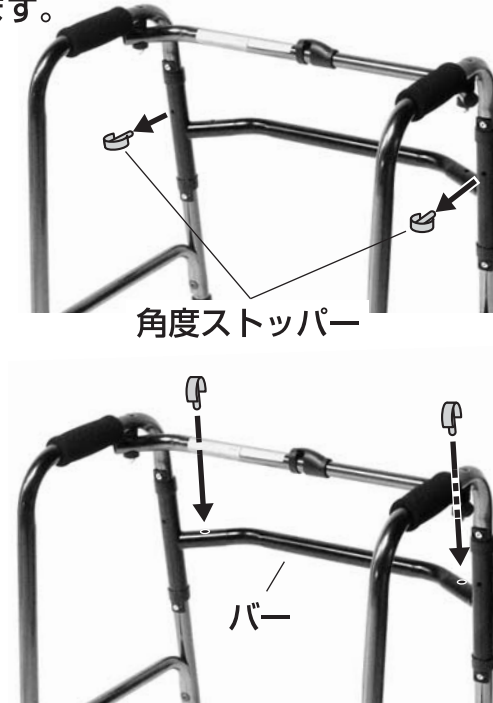

②ロック解除ボタンを押しながらサイドフレームを折り畳みます。

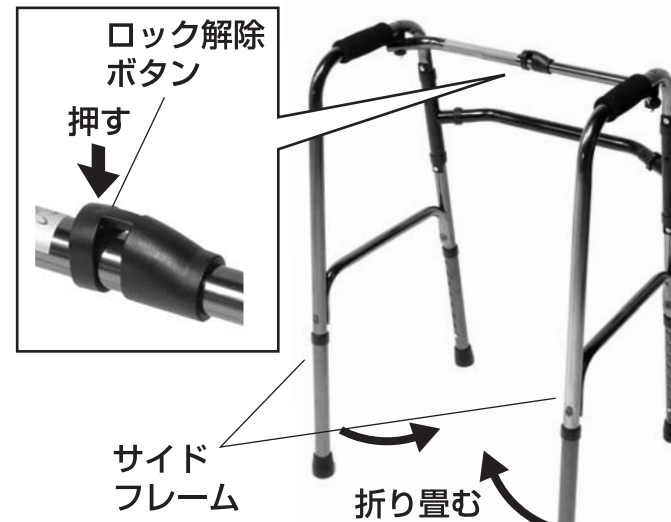

高さの調節方法



必ず全ての脚を同じ高さにしてください。

下記を目安にし、身長に合わせて最適な高さに調節します。



- 183cm以上
- 179～182cm
- 173～178cm
- 169～172cm
- 163～168cm
- 159～162cm
- 153～158cm
- 152cm以下


<身長を目安>




交互型歩行器として使用する場合

①右足を前に出します。


上から見た図

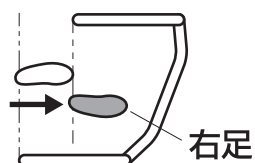


②サイドフレーム(右)を前に出します。

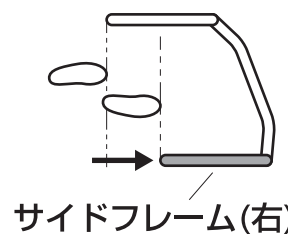

②左足を前に出します。

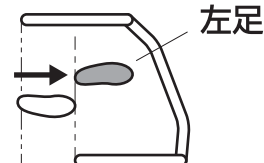


④サイドフレーム(左)を前に出します。
サイドフレーム(左)

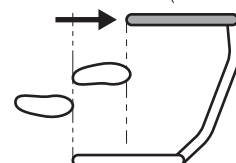


固定型歩行器として使用する場合

①角度ストッパーをバーから取外します。

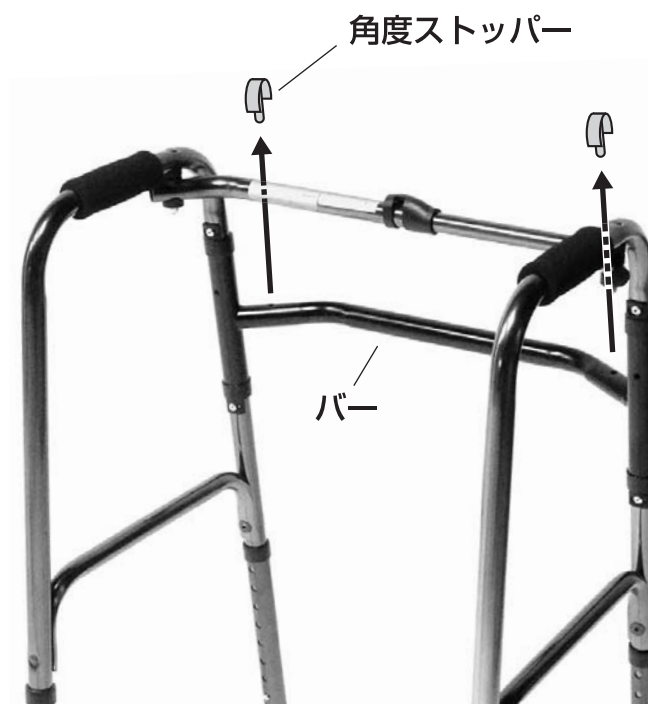

②サイドフレームの下図の位置に角度ストッパーを取付けます。

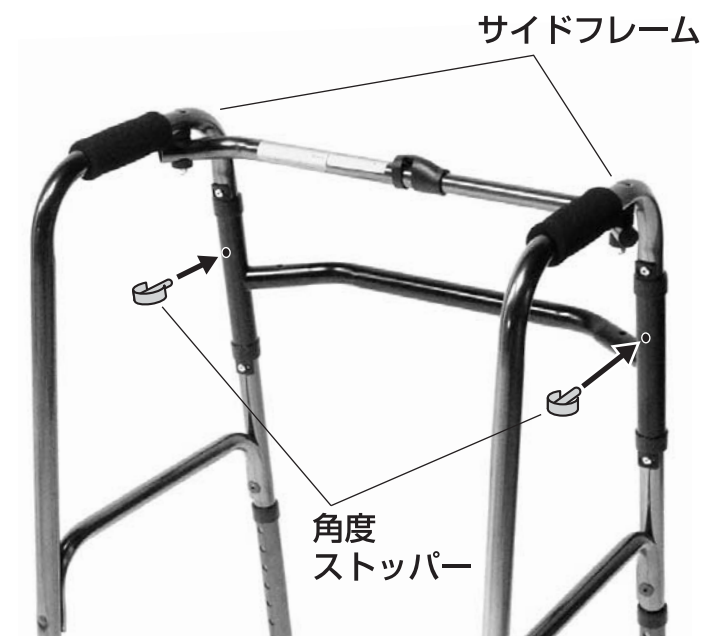

角度が固定され、固定型歩行器として使用できます。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島稗田町1861 TEL: 086-473-9152
BH/AG/TTDaSs