

杖(介護・自立型・右手用)(EEX-ST03Rシリーズ)取扱説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は下記の要領でお取り扱いください。

1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や高温となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

2.高さ調節方法


①リングを矢印の方向に回し、ゆるめます。

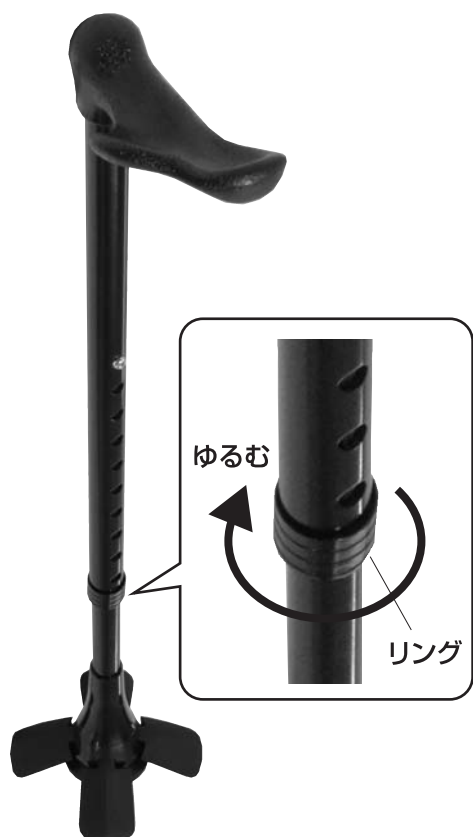

②ストッパーを押しながら杖を伸縮し、長さを調節します。



③リングを矢印の方向に回し、しっかりと締め付けて固定します。

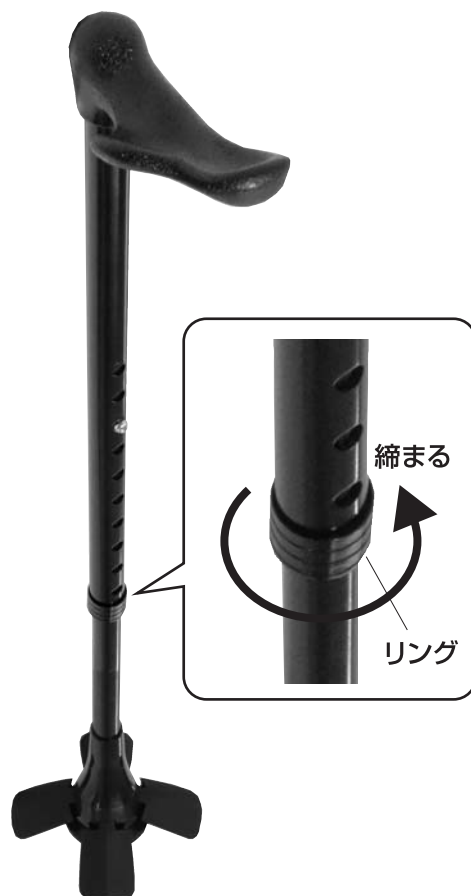

3.仕様

サイズ	W140×D178×H750～975mm(10段階可変)
重量	約550g
材質	アルミ合金、ABS樹脂、ラバー

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152
BH/BC/TTDeSs