

集音器(EEX-SUCL1)取扱説明書

この度は、集音器「EEX-SUCL1」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①集音器 1台
 - ②イヤークリップ(小) 2個
 - ③イヤークリップ(大) 2個
 - ④ボタン電池(LR44/テスト用) ... 1個
 - ⑤収納ケース 1個
 - ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SUCL1)と上記の番号(①~⑥)と名称(イヤークリップ(小)など)をお知らせください。

安全にお使いいただくために


注意

- 本製品は医療用機器ではありません。
- 使用中に不快感を感じた場合は、医療機関にご相談ください。
- 無理に耳に押し込まないでください。快適な位置に、優しく装着してください。
- 衛生上、ご本人以外の方は使用しないでください。
- 本製品には小さな部品が含まれています。小児の手の届かない場所に保管してください。
- 激しいスポーツやエクササイズをするときは、着用しないでください。
- 雨が降っているときや、顔を洗うときには、着用しないでください。または濡れてしまう可能性があるときや就寝時は着用しないでください。
- 携帯電話を使用するときは、着用しないでください。
- 使用していないときは、スイッチを切って収納ケースに入れ、カバーを閉じてください。
- これにより、不要なバッテリーの消費を防ぎます。
- ペースメーカーなどの他の電子機器を着用する場合は、本製品を使用する前に、まず医師の承認を受けてください。
- 使用していないときは、直射日光・高湿度を避け、涼しい場所に保管してください。

1.仕様

周波数	800~1600Hz
ボタン電池	675 / PR44(最大100時間使用)、または357 / LR44(最大20時間使用)
連続使用時間	約100時間
サウンドレベル	34±5dB
サイズ・重量	W20×H105×D14mm・8g

2.各部の名称

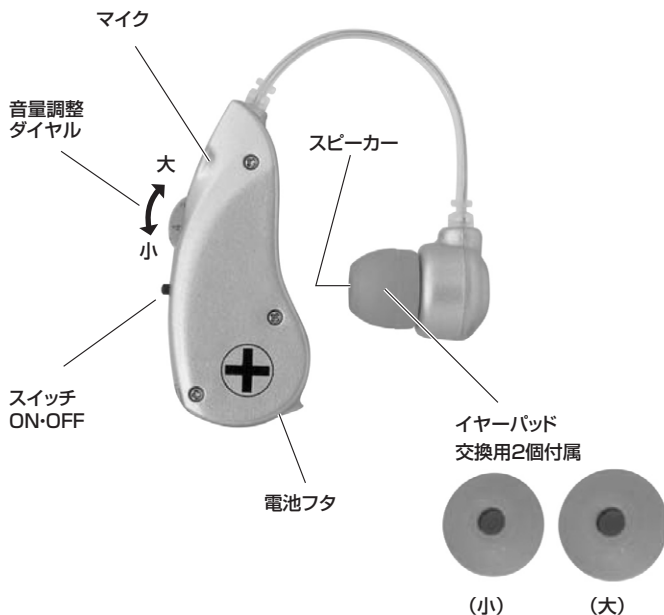


3.電池の入れ方



電池フタをあげ、電池の向きに注意して、電池フタに電池を設置します。電池フタを締めれば、電池は取付け完了です。

電池の交換時は、逆の手順で電池を取り出してください。

<電池の極性の見方>

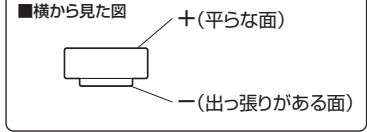

本体の+、-表示に電池の向きを合わせて入れます。

音が極端に小さくなったり、もしくは完全に音が出なくなったら新しい電池に交換してください。

4.使用方法



1. 電池を入れた本体のスイッチをONにします。
2. 大小2種類のイヤークリップが付属しています。耳に最も適したイヤークリップを本体に取り付けてください。購入時は(小)が付いています。
3. 音量を中央(3~4)の設定に調整し、本体を耳の後ろにあて、イヤホンを耳に装着してください。
4. 音量を適切なレベルに調整します。厳しい雑音が聞こえる場合は、音量設定が高すぎるか、適切に装着できていないので、調整してください。
5. 使用を終えたら、スイッチをOFFにし、収納ケースに収納してください。

収納ケース



5.保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番: EEX-SUCL1	シリアルナンバー
お客様: お名前・ご住所・TEL		
購入店: 担当者		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

Ver.1.0

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島柳田町1861 TEL: 086-473-9152

BI/AJ/HADNo