

トイレ用 立ち上がり手すり(EEX-SUP03シリーズ)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver.1.0

組立説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

<用意していただくもの>


手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図


<フックを右側にする場合>

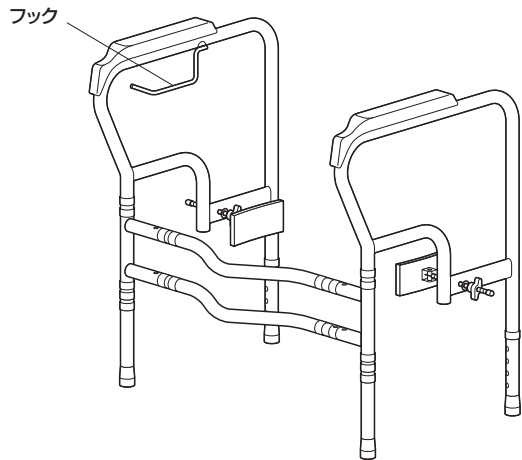

<フックを左側にする場合>

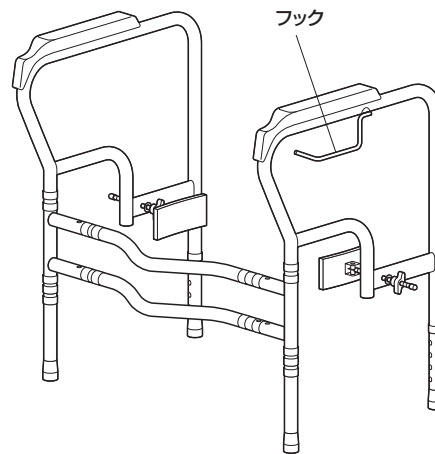


組立て部品

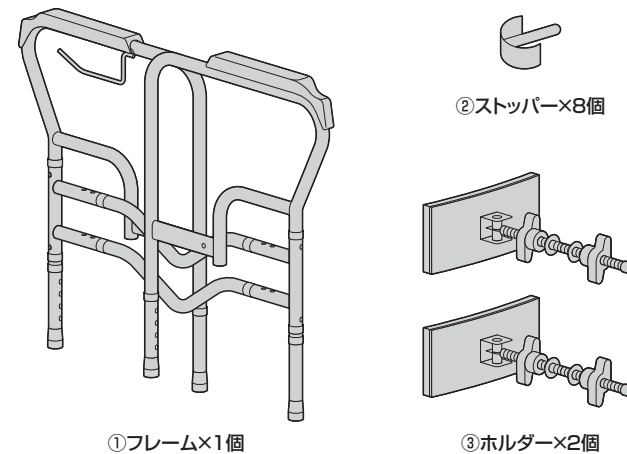


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SUP03など)と上記の部品番号(①~③)と部品名(ストッパーなど)をお知らせください。

フックを右側にする場合


1. フックの付いていないフレームを開きます。

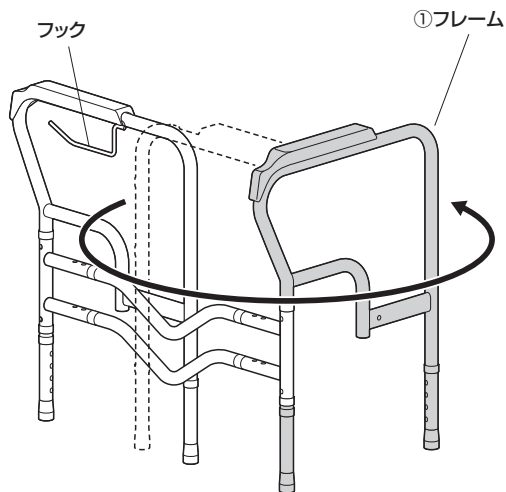


2. ストッパーで固定します。

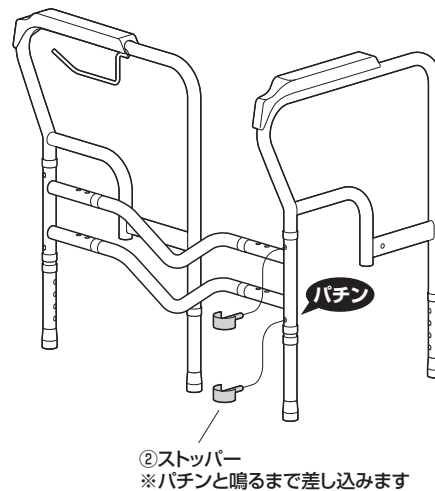

3. 反対側のフレームを開きます。

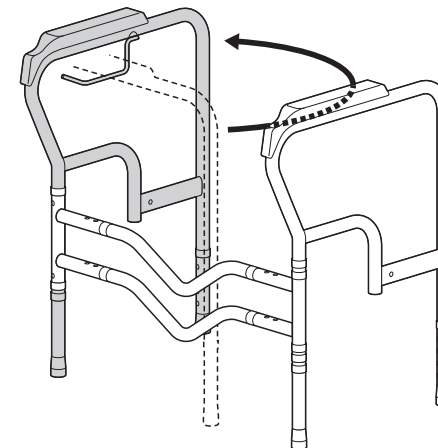


4. ストッパーで固定します。

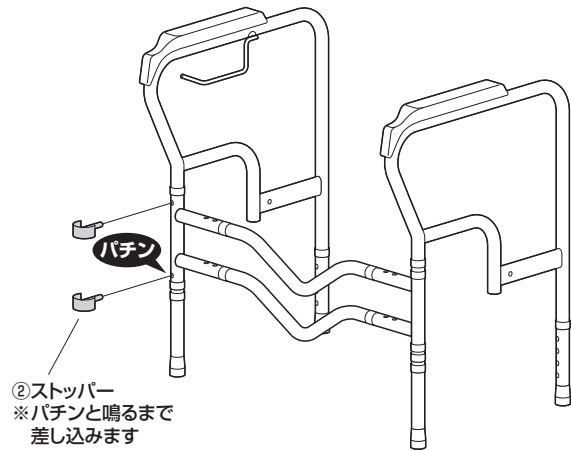


5. フレームを伸ばします。

①前パイプを起こします。

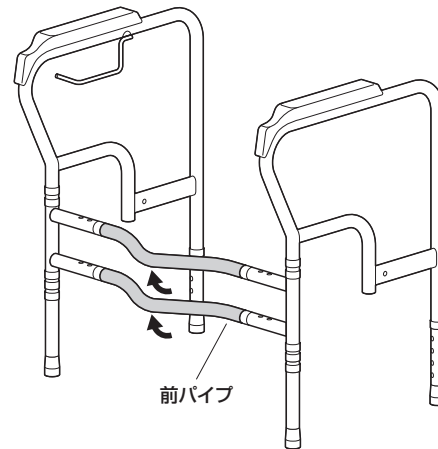


②ストッパーで固定します。

②ストッパー
※内側の穴に
差し込みます
※パチンと鳴るまで
差し込みます

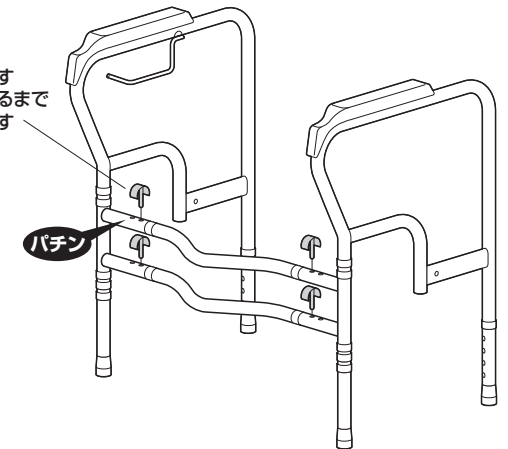


6. ホルダーのつまみを外します。


①キャップを外します。

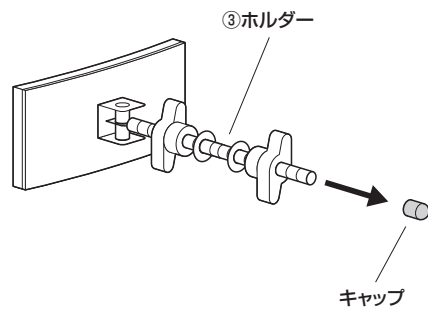

②片方のつまみと、ワッシャー1枚を外します。

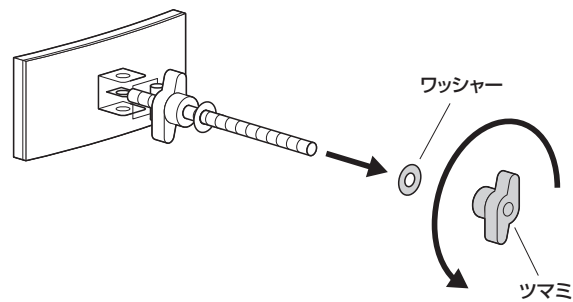

③もう一つのつまみを根元まで締め付けます。

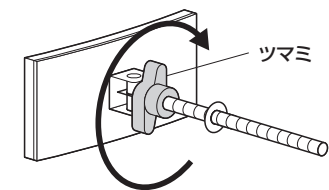


※もう一つのホルダーも同様につまみを外します。


フックを右側にする場合

7. フレームにホルダーを取付けて、完成です。


①フレームにホルダーを差し込みます。

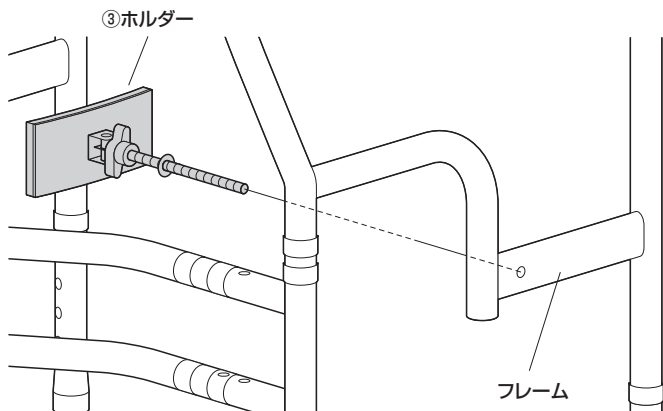

②ツマミで締め付けて固定します。

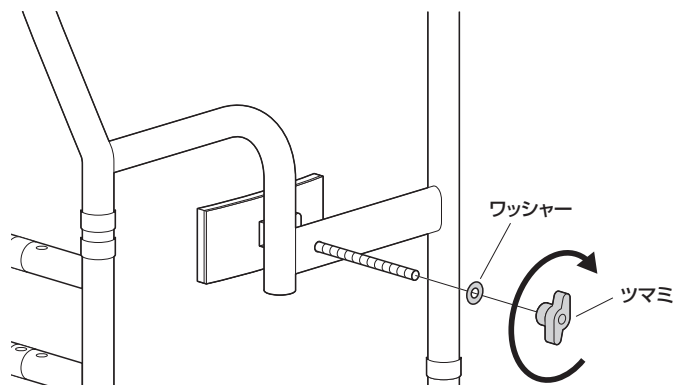


③キャップを取付けます。

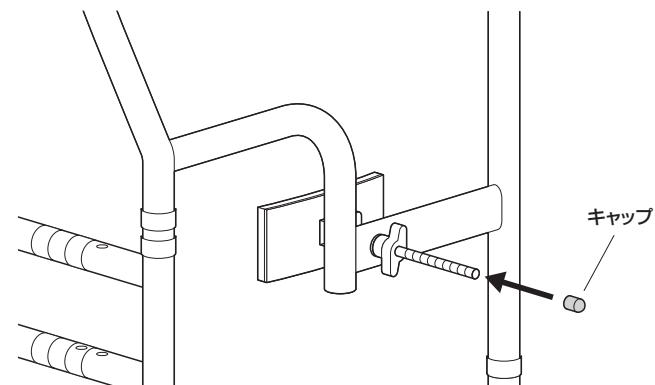

※もう一つのホルダーも同様に取付けます。


フックを左側にする場合

1. フックの付いていないフレームを開きます。

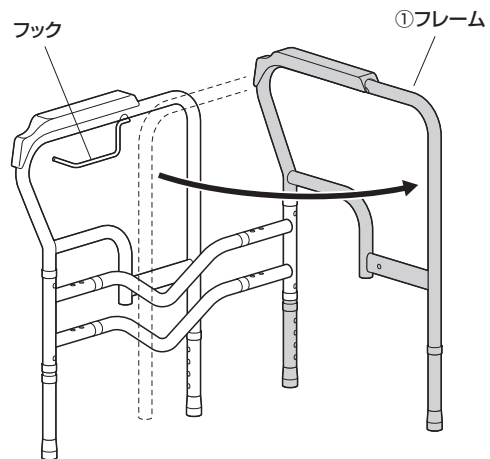


2. ストッパーで固定します。


②ストッパー
※パチンと鳴るまで
差し込みます

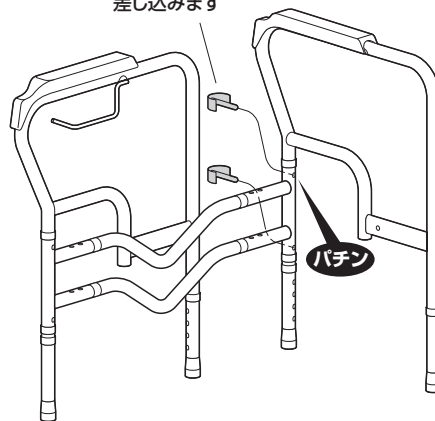

3. 反対側のフレームを開きます。

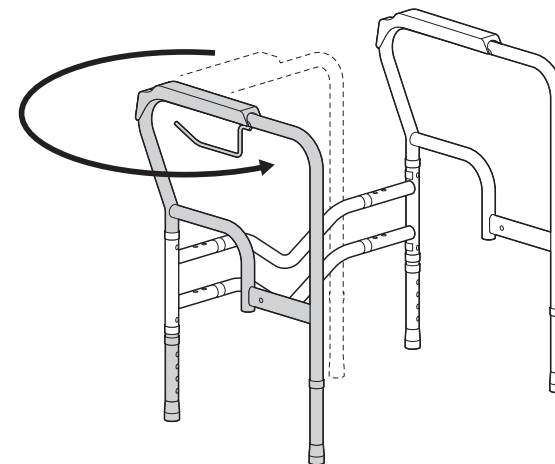


4. ストッパーで固定します。

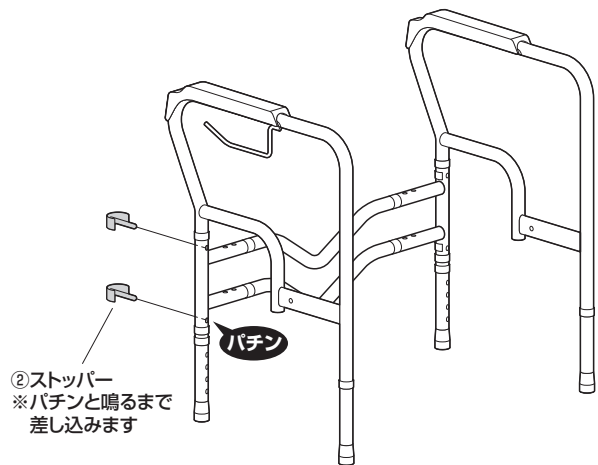


5. フレームを伸ばします。

①前パイプを起こします。

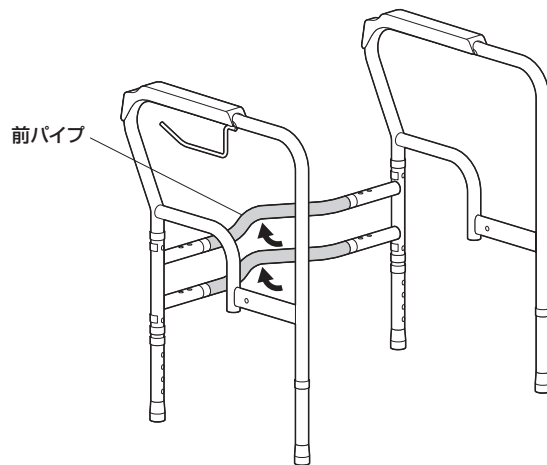


②ストッパーで固定します。

②ストッパー
※内側の穴に差し込みます。
※パチンと鳴るまで差し込みます。

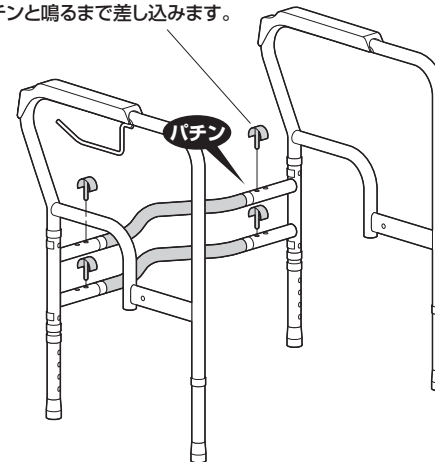


6. ホルダーのつまみを外します。


①キャップを外します。

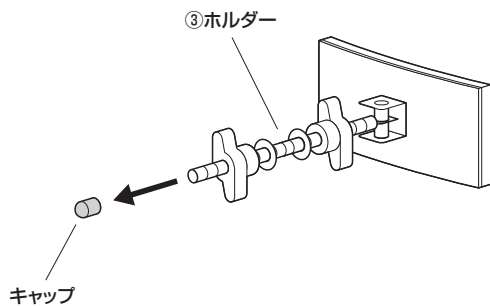

②片方のつまみと、ワッシャー1枚を外します。

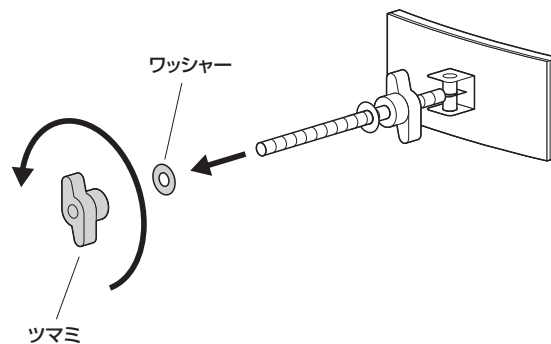

③もう一つのつまみを根元まで締め付けます。

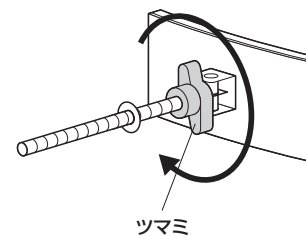


※もう一つのホルダーも同様につまみを外します。


フックを左側にする場合

7. フレームにホルダーを取付けて、完成です。


①フレームにホルダーを差し込みます。

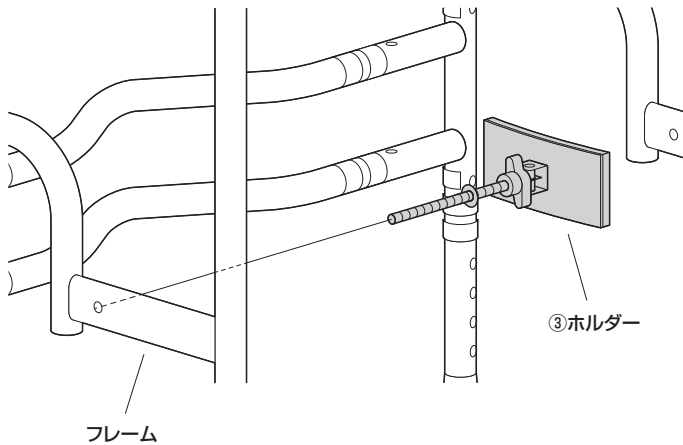

②ツマミで締め付けて固定します。

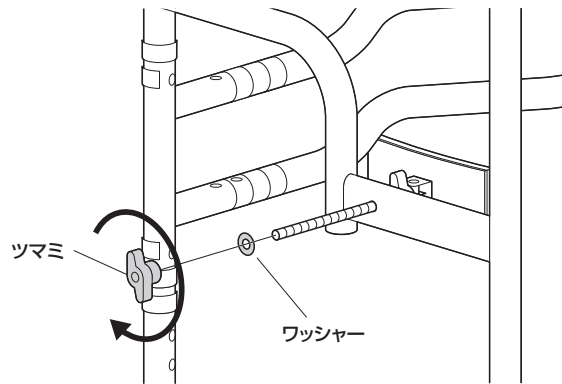

③キャップを取付けます。

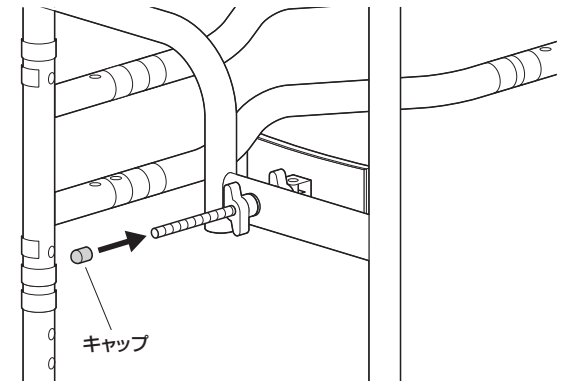


※もう一つのホルダーも同様に取付けます。

高さの調節方法

ボタン
※4段階で高さを調節できます。


押す

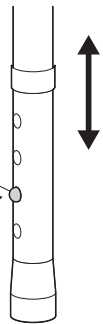


<注意>
全て同じ高さにしてください。

幅の調節方法


①ストッパーを外します。

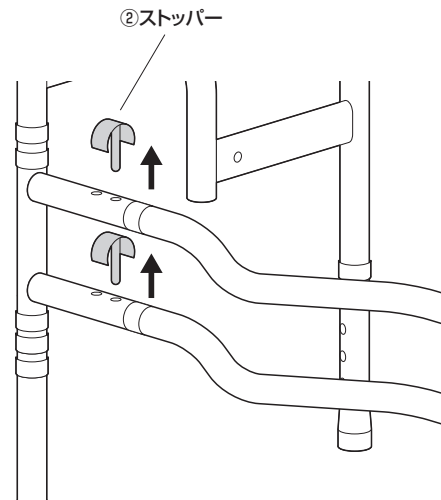

②前パイプの長さを調節します。

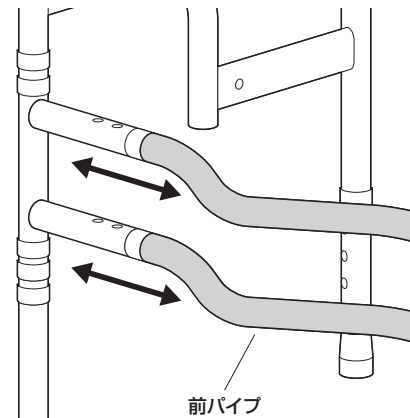

③ストッパーを差し込んで固定します。

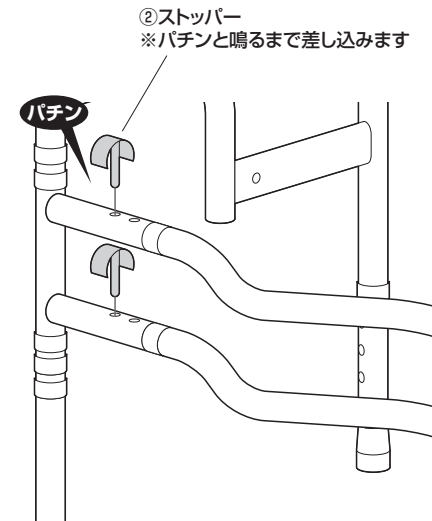


※反対側も同様に調節します。


設置方法

①便器に差し込みます。


※下図はフックを左側にする場合のイラストです。

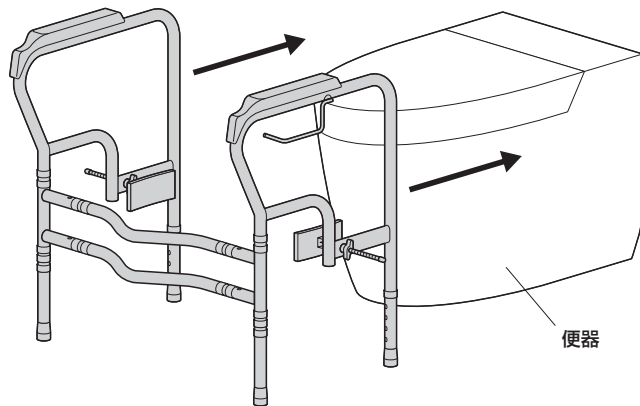


②ホルダーの外側のツマミを緩めます。

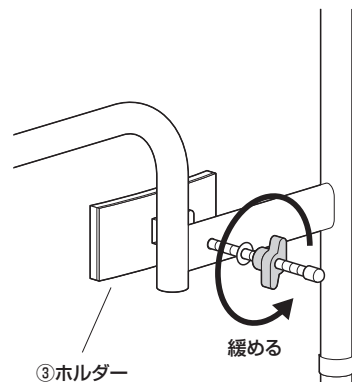

③ホルダーを便器に押し付けて、内側のツマミを最後まで緩めます。

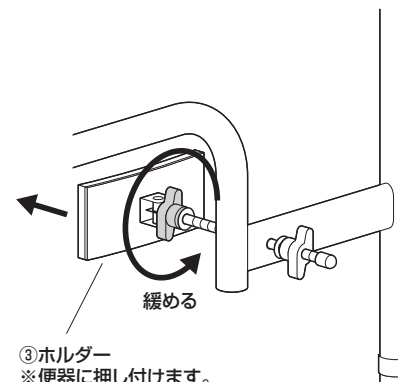

④外側のツマミを締め付けて固定します。

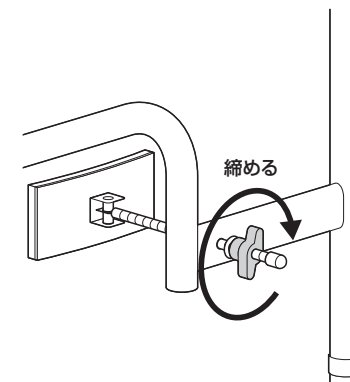

※もう一つのホルダーも同様に固定します。

品質表示

構造部材：スチール

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 部品がゆるんだ状態では使用しないでください。
 - フレームの上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手指などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島栢田町1861 TEL: 086-473-9152

CC/AF/RKDac