

シャワーチェア(EEX-SUPA02A)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


<用意していただくもの>

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

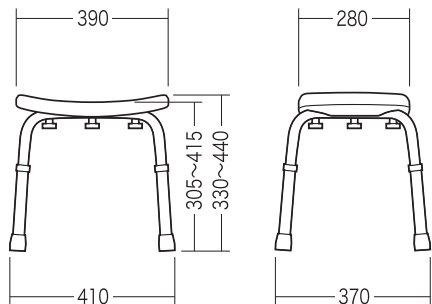

組立て部品

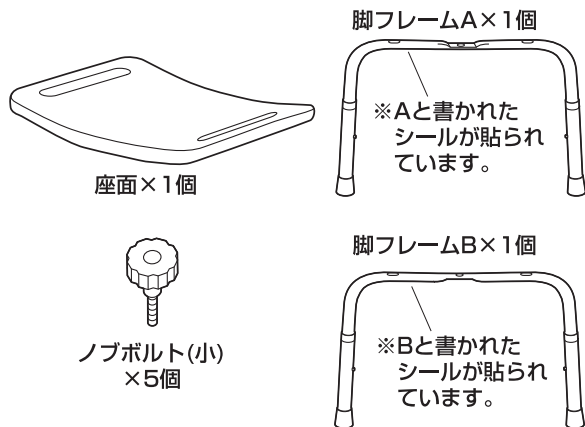

座面の高さの調節方法

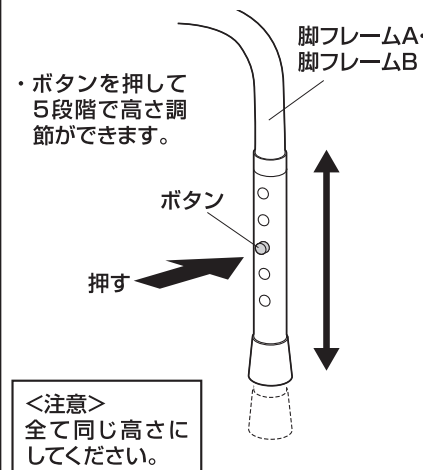

チェアの品質表示


外形寸法：幅410×奥行370×高さ330~440mm
(座面高さ305~415mm)

構造部材：パイプ部/アルミ 座部/PE


<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所や乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 必ず椅子の中央に座り、端の方に座らないでください。転倒する恐れがあります。
 - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。


1.座面に脚フレームAと脚フレームBを取付けます。

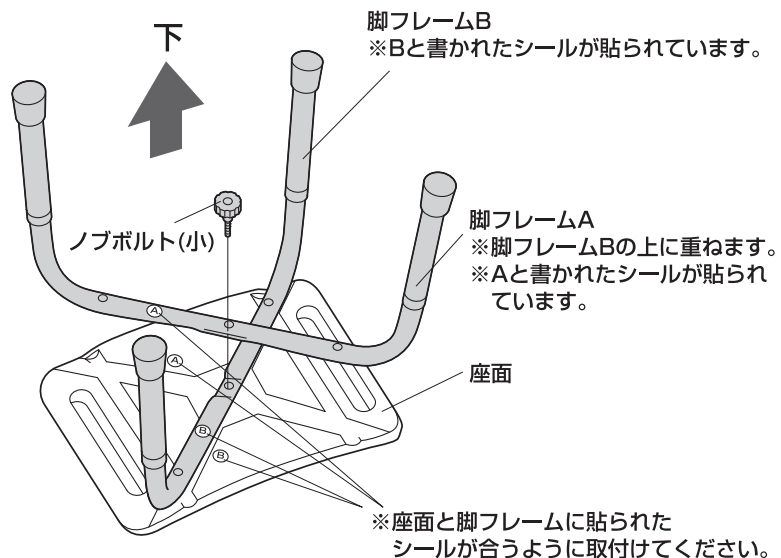

2.残りのノブボルトを取付けます。

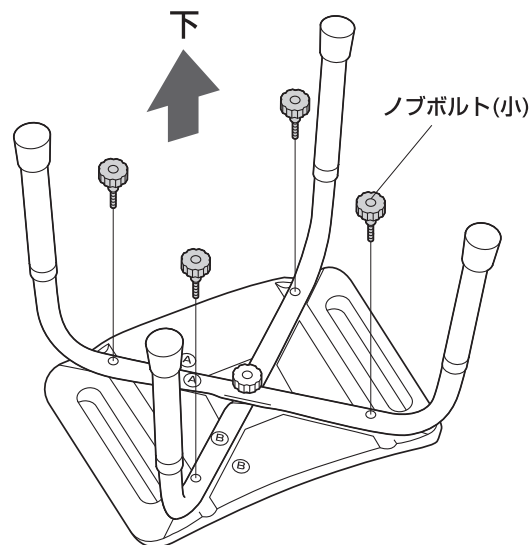

3.起こして完成です。

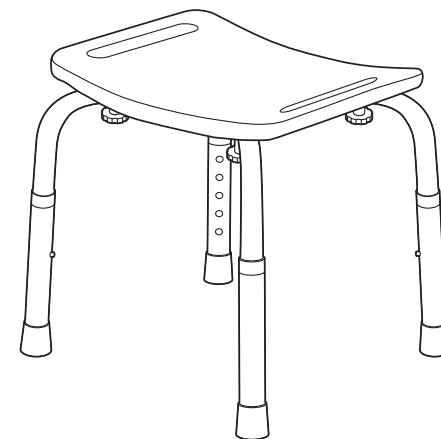

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/BD/KIDeT