

# チャワーチェア 折りたたみ式(EEX-SUPA07F)取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は折り畳み式です。下記のとおりでご使用ください。

取扱説明書は大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 完成図



## チェアの品質表示

外形寸法：幅510×奥行445×高さ487mm  
構造部材：パイプ部/アルミニウム 座部/ポリエチレン

### <使用上の注意>


- 直射日光の当たる場所や乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 必ず椅子の中央に座り、端の方に座らないでください。転倒する恐れがあります。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

## 1.下図のように置きます。


※組立の際、可動部に指などを挟まないようにご注意ください。



## 2.座部を持ち上げます。

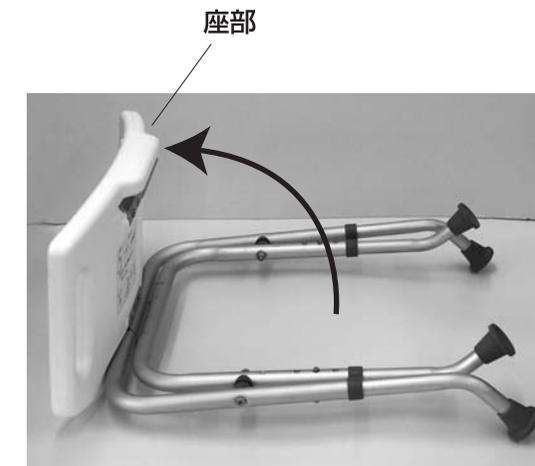

## 3.全体を起こして、脚部を開き、座面を固定して完成です。

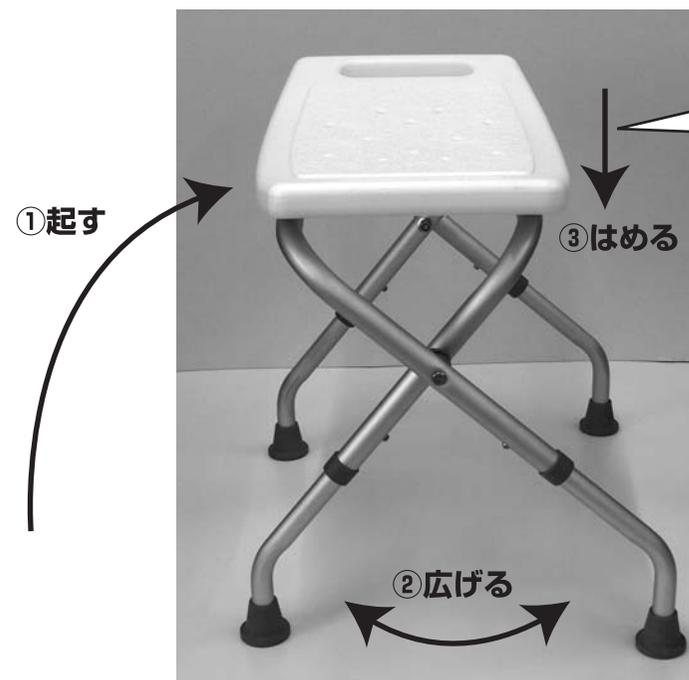

座面裏面のフックにはめ込んで固定します。



※座面を上から押して、しっかりはめ込んでください。


## 座面の折り畳み方法

脚を広げたのと逆の手順で折り畳むことができます。



## 座面の高さの調節方法

脚部のボタンを押して3段階の高さ調節ができます。

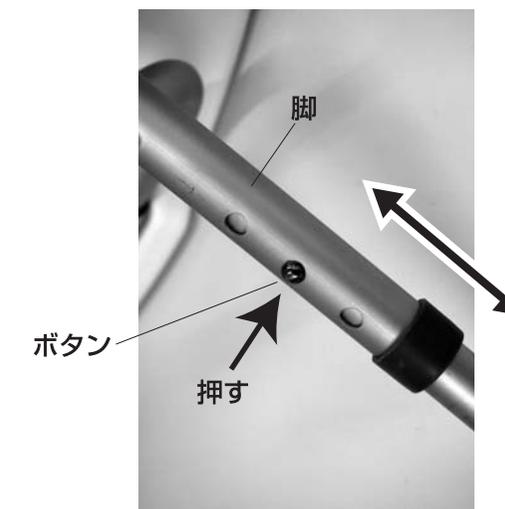

<注意>  
全て同じ高さにしてください。

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート株式会社

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島榎田町1861 TEL: 086-473-9152

BH/AJ/TTDaT