

手すり 吸盤設置 30cm(EEX-SUPA11B) 手すり 吸盤設置 40cm(EEX-SUPA12B)取扱説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は下記の要領でお取り扱いください。

Ver1.0

取扱説明書は大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

使用上の注意




- 使用前に本製品がしっかり取付けられている事を確認してください。必要に応じて取付け直してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品をホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

取付け方法


1. 取り付ける前に、吸盤を点検して、ゴミが付着していないことを確認します。
※吸盤をきれいにして取付けてください。
2. タブを持ち上げ、本製品を滑らかで清潔で乾いた表面の場所に配置します。
※取付け面を、清潔で乾いた状態にしてください。

※吸盤がタイルの目地
と重なる場合は使用
できません。

※通気性のある壁や
凹凸のある壁には
使用できません。

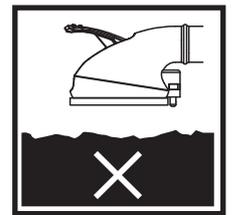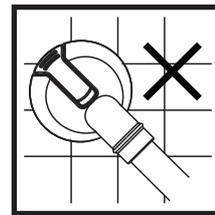
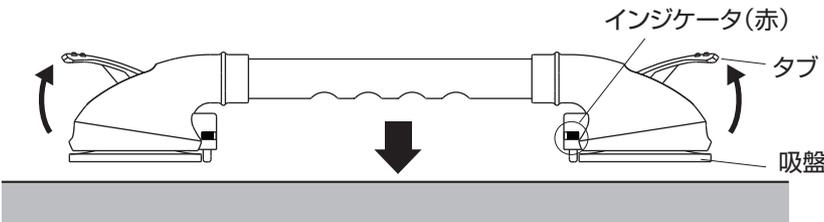


3. 本製品を壁に押し当てて、インジケータが赤から緑に変わったのを確認して
タブを押し込んで所定の位置に固定します。
※インジケータが赤から緑に変わったら、本製品は正しく固定されています。
4. 取り付けた後、本製品を手で持って表面に固定されていることを確認します。
取り付いていない場合は、取り付け直してください。

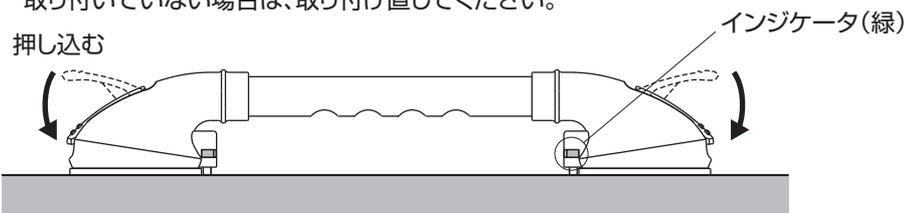

注意

ご使用前にインジケータが緑になっていることを確認してください。
赤が見える場合は、正しく固定されていません、取付け直してください。

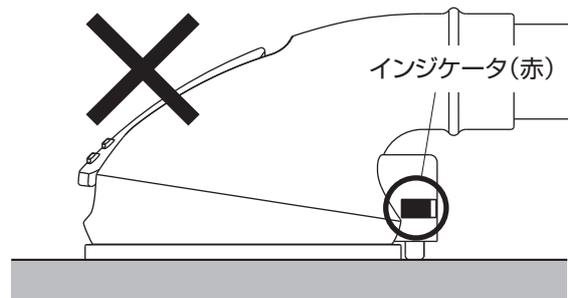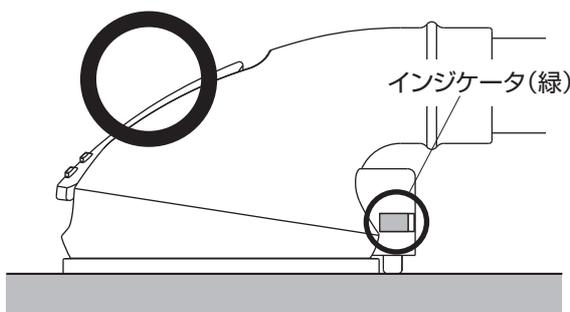

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

BJ/AF/KTD&T

山陽トランスポート有限会社

店舗名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>
岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152