

# シャワーチェア(EEX-SUPA13シリーズ)組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

Ver1.0


**組立説明書は大切に保管してください。**  
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)  
プラスドライバー

## 完成図

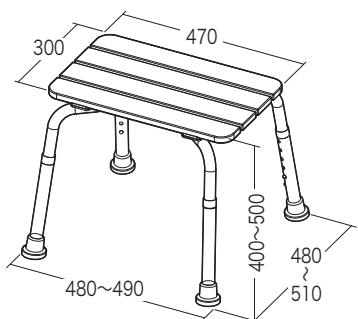


## 組立て部品

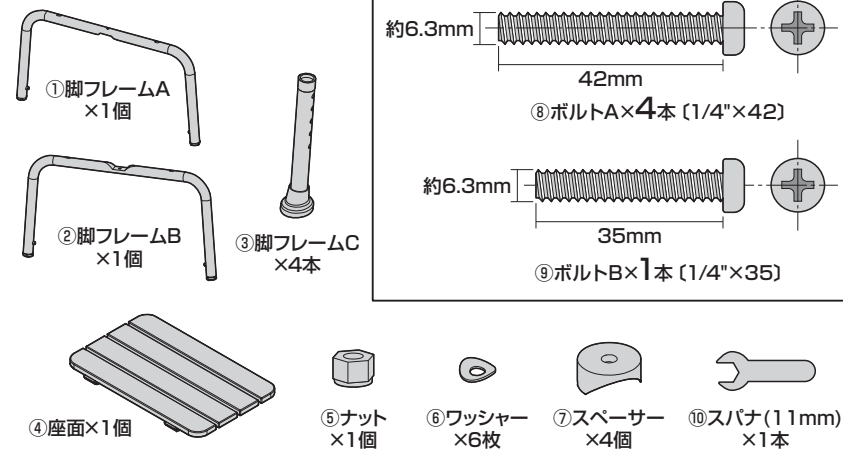


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EEX-SUPA13など)と上記の部品番号(①~⑩)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。

### <使用ボルト>

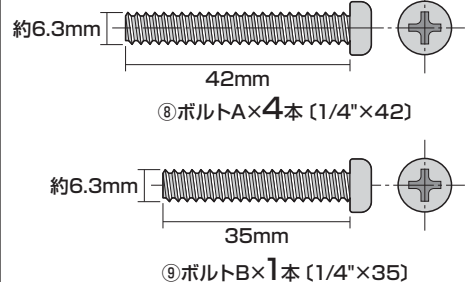

## 座面の高さの調節方法

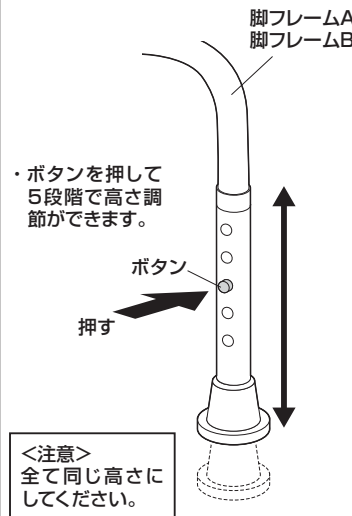

<注意>  
全て同じ高さにしてください。

## チェアの品質表示


外形寸法: 幅480~490×奥行480~510×高さ400~500mm  
構造部材: パイプ部/アルミ 座部/PS

### 【取扱上の注意】

- 直射日光の当たる場所や乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 必ずチェアの中央に座り、端の方に座らないでください。転倒する恐れがあります。
- 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

## 1.脚フレームA、脚フレームBに脚フレームCを取付けます。

<注意>  
全て同じ高さにしてください。

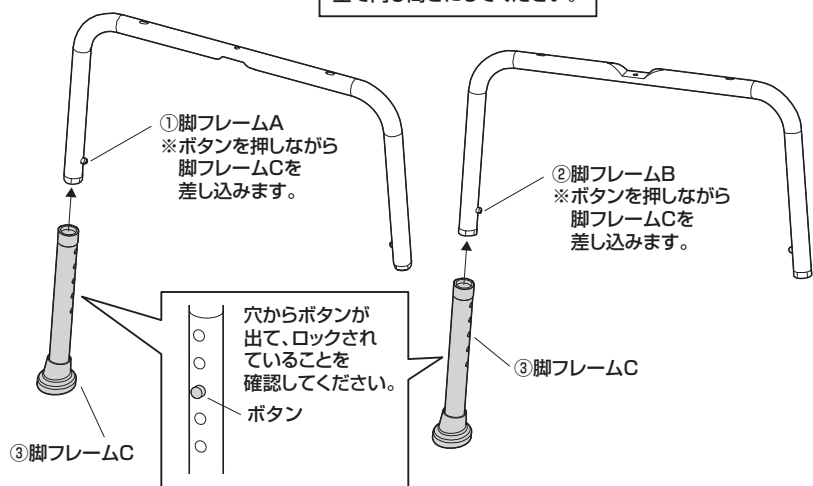



※それぞれ同様に反対側にも脚フレームCを取付けます。

## 2.脚フレームに座面を取付けて完成です。




### 横から見た図


ナットとワッシャーは脚フレームBのパイプに沿う向きで取付けます。

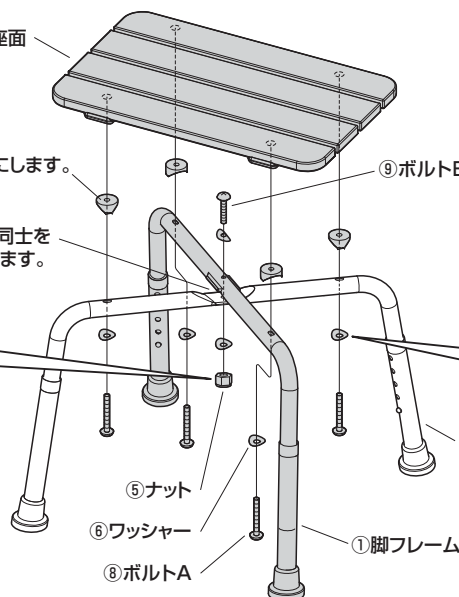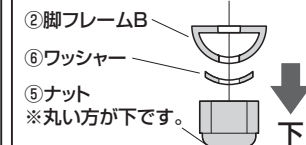

### <使用ボルト>

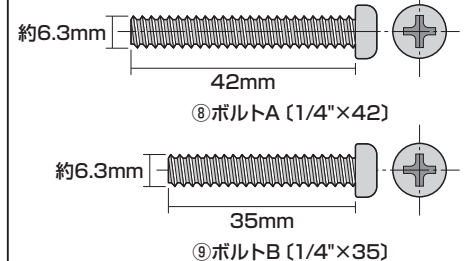

### 横から見た図

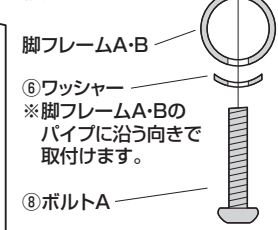

## 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

CA/AD/HADaNo

山陽トランスポート有限公司  
店番名: イーサプライ <https://www.esupply.co.jp>  
岡山県倉敷市児島橋田11861 TEL: 086-473-9152