


# 折りたたみシャワーチェア (EEX-SUPA17) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきまして  
ありがとうございました。  
安全のため、下記の取扱方法を守ってお使いください。

取扱説明書は大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

Ver1.0

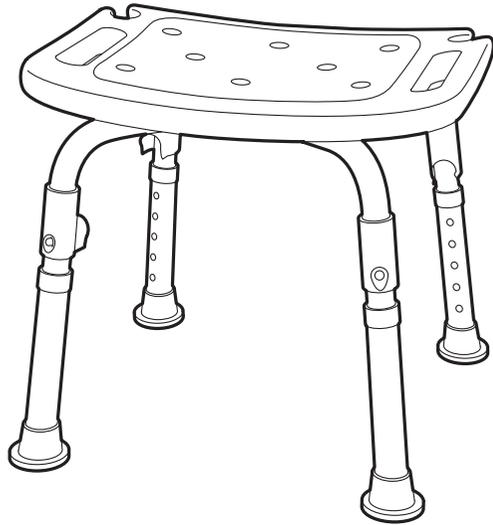

## 高さの調節方法

・ボタンを押して  
5段階で高さ調節  
ができます。

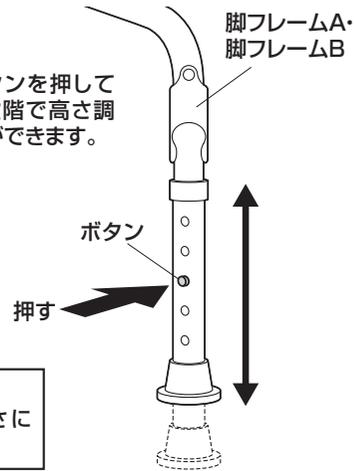

<注意>  
全て同じ高さに  
してください。

## チェアの品質表示


構造部材：パイプ部/アルミ 座部/PE

### <使用上の注意>


- 直射日光の当たる場所や乾燥の著しい場所を避けてください。
  - 滑りやすい床面で使用しないでください。
  - 用途以外で使用しないでください。
  - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
  - 必ず椅子の中央に座り、端の方に座らないでください。転倒する恐れがあります。
  - 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
  - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
  - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
  - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
  - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
  - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

## 脚の開き方

①脚を開きます。

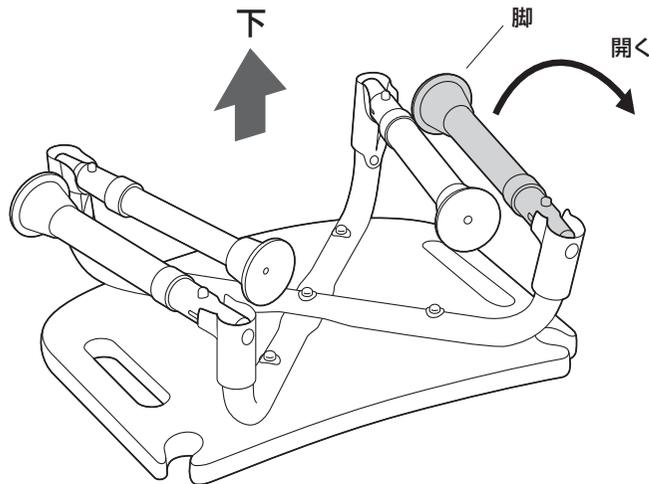


②脚を矢印の方向に「カチッ」と音になるまで  
差し込みます。

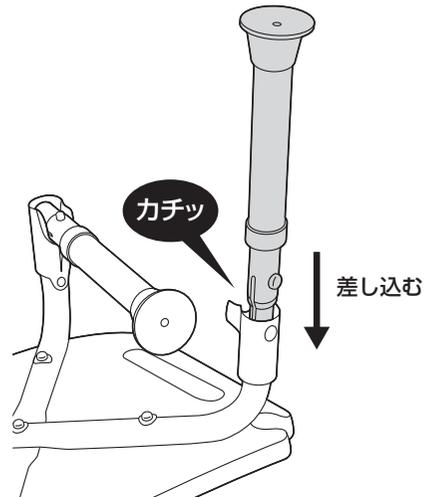


※同様に全ての脚を開きます。

③チェアを起こします。

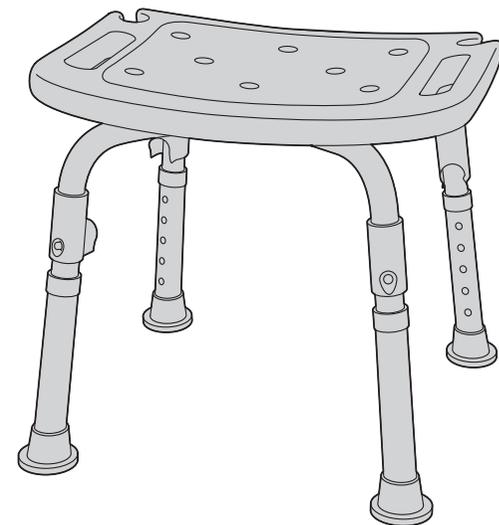


## 脚の折りたたみ方


①チェアをひっくり返し、下図のボタンを押しながら脚を引き出します。

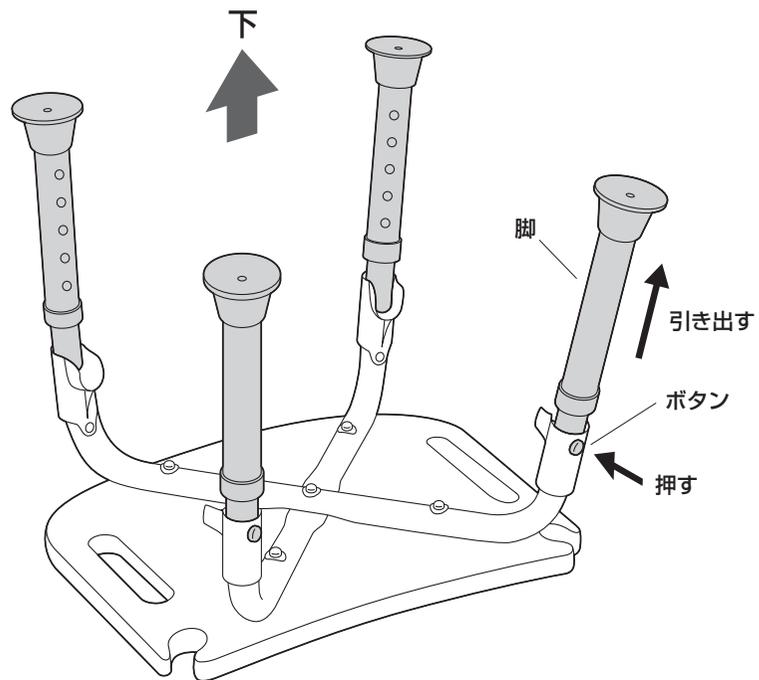

②脚を折り畳みます。

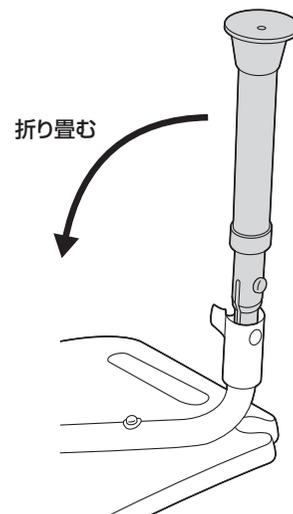

③同様に全ての脚を折り畳みます。

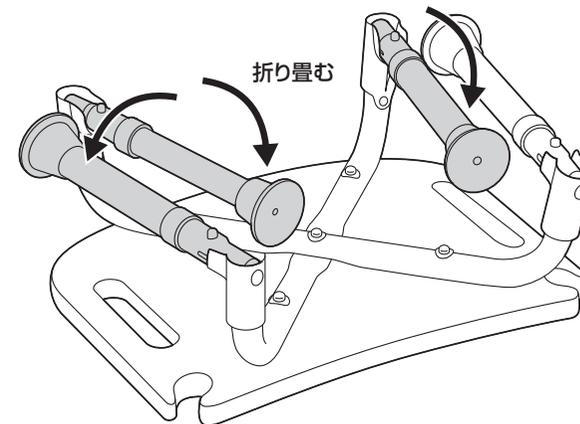

### 製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店までお気軽にご相談ください。

山陽トランスポート有限公司

店舗名: イーサプライ <http://www.esupply.co.jp>

岡山県倉敷市児島神田町1861 TEL: 086-473-9152

CB/AD/TTDaT